

# Respire Melhor™

## O Tamanho certo!


Respire Melhor desenvolveu dois tamanhos das tiras nasais para que você encontre o tamanho certo para o seu nariz.



É muito simples identificar o tamanho de Respire Melhor, basta seguir as instruções abaixo.



- 1- Imprima essa página e recorte a área demarcada das tiras nasais.
- 2- Fique em frente ao espelho
- 3- Coloque o molde sobre o nariz na posição correta de Respire Melhor, abaixo do osso e em cima das narinas.  
(veja o diagrama para aplicação correta)

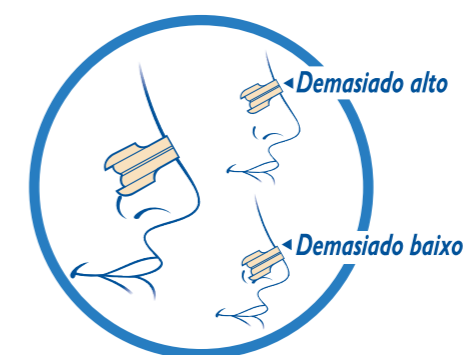

### Analizando as tiras:

Para escolher o tamanho médio, a tira letra **A** deve cobrir somente o nariz. A tira letra **B**, grande, deve ter ultrapassado o nariz até chegar nas bochechas.

Dica: 75% dos adultos se enquadram na tira **A**.

Escolha o tamanho **B**, grande, se a tira **B** cobrir somente o nariz, sem tocar as bochechas.